

商品名稱：

慕樂墊片加壓式腰薦護具

Mueller Adjustable Back Brace



商品介紹：

1. 附有拆卸式護腰墊片，集中加強支撐髖關節
2. 不鏽鋼鍊狀彈簧更加貼合背部
3. 背部附有雙層設計式可自行調保護強度及舒適度
4. 拆卸式腰椎墊片具有緩衝和集中支撐腰部的功能
5. 錐形剪裁可完美服貼於背部，提供最好的保護。

使用說明：

1. 將腰椎墊片置於腰部護具內側織布的中央
2. 解開外層鬆緊帶
3. 將主彈性護腰帶繞在腰背部並在前方繫好
4. 將腰部周圍的左側外層彈性繫帶在主彈性護腰帶上繫好
5. 將腰部周圍的右側外層彈性繫帶在主彈性護腰帶上繫好
6. 根據腰部鬆緊調整舒適度

適用範圍：背部拉傷、韌帶扭傷

注意事項：

1. 建議穿戴每 2 小時應卸下護具 10 分鐘休息，若遇汗水浸濕後建議務必洗滌。
2. 若肌膚不適或有過敏現象，請立即停止使用並就醫

尺寸：one size (腰圍 71cm-127cm)

許可證字號：衛部醫器輸壹登字第 a00071 號、衛部醫器陸輸壹登字第 a00048 號