

目次

前言

3D 按摩椅墊 LITE 介紹	3
為確保安全	3
各部位名稱與附件	9
遙控器功能說明	10

使用方法

設置按摩椅墊	11
安裝緩衝墊	13
進行按摩	14

其他

清潔與保管說明	17
疑似故障時	18
主要規格	19
保固及售後服務	21

前言

3D按摩椅墊LITE介紹

3D按摩椅墊LITE為椅墊型的家庭用按摩機器，可利用固定帶安裝在家裡使用的椅子或和室椅等上使用。

為確保安全

安全注意事項

為防範對使用者與其他人造成危害、財物損失於未然，以下將說明務必要遵守的事項。

請確實理解以下內容（標示、圖示）再詳讀本文，務必要遵守刊登事項。

警告／注意說明
按錯誤使用產品時
會發生的危險與損害程度作區分，進行說明。



警告

表示錯誤使用產品可能會造成死亡或重傷的內容。



注意

表示錯誤使用產品可能會造成受傷或物品損失的內容。

圖示範例

將使用下列圖示說明應遵守的內容。



禁止分解

⊘ 代表不能做的「禁止」內容。
⊘ 的中央或旁邊將以圖片或文字標明具體的禁止內容，左方圖示代表「禁止分解」。



拔下電源插頭

● 使用產品時，應按指示強制執行的標示。
● 的中央或旁邊將以圖片或文字標明具體的指示內容，左方圖示代表「拔下電源插頭」。

警告

- 本產品為家庭用按摩器。請勿使用於其他用途。
- 由醫生禁止按摩者請勿使用本產品以免導致症狀惡化。
【例如：有心臟病症狀、急性症狀、發燒症狀、血壓異常、血栓（栓塞）症狀、重度動脈瘤、急性靜脈瘤、各種皮膚炎與皮膚感染症狀（包含皮下組織發炎）、頸椎病變、喝酒或正在服用藥物者、曾經因為化學纖維引發接觸性皮膚炎者、身體不太好者、極度疲憊者等請勿使用本產品】
- 無法自己表達意見或無法自行操作產品者請勿使用本產品以避免受傷與意外事故。
- 使用本產品時請勿進行其他作業以避免受傷與意外事故。
- 請勿戴著飾品等堅硬物體或是圍巾、穿著衣領有裝飾的衣服等使用本產品以避免受傷與意外事故。
- 請勿使用超過額定容量的插座與配線器具，請勿將本產品用於交流電壓110V以外的電源以免引發火災。
- 請勿讓嬰幼兒或兒童使用或是把玩本產品、坐在本產品上以免發生意外事故。
- 請勿將本產品用於頸部（脖子）。
- 請勿在瓦斯爐等火源旁邊或是電熱毯上使用本產品，以免造成火災或產品故障。
- 請勿邊吸菸邊使用本產品。
- 請勿將本產品放入暖桌或棉被裡使用，以免造成意外事故或產品故障。
- 請勿故意拆下本產品的坐椅墊套，在椅墊套破掉的情況下使用本產品非常地危險，切勿嘗試。
- 請勿使用針等尖銳物品或異物插入本產品或AC變流器，以免造成火災、觸電或意外事故。
- 請勿將AC變流器的電線纏繞在按摩椅墊本體或AC變流器本體上，以避免電線斷裂所造成的火災與觸電。
- 請勿破壞、加工、拉扯、用力彎曲、扭轉AC變流器的電源線，以及網起電源線使用本產品。此外，請勿在電源線上放置重物或將電源線夾在重物中以免引起火災與觸電。
- 將AC變流器插頭從插座上拔下時，請勿拉扯電源線以避免絕緣不良所造成的火災、觸電、短路等起火原因。
- 請勿使用附件AC變流器以外的電源，另外，附件AC變流器為本產品專用，請勿使用於其他機器，以免引發火災、造成觸電與產品故障。



禁止

警告

- 若要將本產品用於下列部位，務必要向醫生洽詢
 - 做過整形手術的部位、皮膚下方埋有金屬、塑膠、矽膠等物質的部位
 - 有皮膚問題的部位，例如：異位性皮膚炎、臉部黑斑、皮膚發炎、出現發癢發熱的部位、因物理刺激等造成病態黑斑與痣、敏感肌膚、蟹足腫體質等
 - 有感覺、知覺障礙的部位
 - 胸部、陰部、頭部
 - 骨折部位、脊椎部位、關節部位
- 下列人士請務必向醫生洽詢後再使用本產品。
 - 使用心律調整器等容易受到電磁波干擾的體內埋入型醫療用電子機器者
 - 體內有惡性腫瘤者
 - 心臟有症狀者
 - 腳部有重度血液循環不良症狀者
 - 被判定為喪失溫度感覺者
 - 懷孕中或剛生產完的女性
 - 因為糖尿病等高度末梢循環器官障礙而導致知覺障礙者
 - 在皮膚上有創傷者
 - 需要靜養或是體力衰退者
 - 體溫38°C以上（發燒期）者，例如：急性發炎症狀（倦怠感、惡寒、血壓變化等）強烈的時期與身體衰弱的時候
 - 有骨質疏鬆症、脊椎骨折、扭傷、肌肉拉傷等急性（疼痛性）症狀者
 - 將本產品用在過去曾經接受治療的部位，或是用在受傷部位者
 - 有肌腱炎、身體受到衝撞、頸椎受傷、脊柱狹窄症、椎間盤凸出者
 - 脊椎異常者，或是脊椎左右彎曲者
 - 正在接受醫生治療者，以及身體感受到上述以外異常者
- 使用前請務必確認椅墊套是否有破損，不論您發現多麼小的破洞都不要使用本產品，請洽詢DOCTORAIR客服專線，以免觸電與受傷。
- 使用本產品前，請先確認遙控器與計時器是否正常運作，當您有一段時間沒有使用本產品時一定要先確認。
- 若您在使用產品時感覺身體出現異常，或是使用產品後也沒有效果，請立刻停止使用本產品並洽詢醫生，以免發生意外事故或造成身體不適。
- 發現產品異常時，請停止使用，並洽詢DOCTORAIR客服專線。
- 將AC變流器插入插座與按摩椅墊本體的電源孔時，請確實插到底。



務必遵守

⚠ 警告

 <p>拔下電源插頭</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●當AC變流器的電源線與插頭受損、電源插頭插入插座會鬆脫時，請立刻停止使用本產品，將AC變流器插頭從插座上拔下，並洽詢DOCTORAIR客服專線，以免引發火災與造成觸電。 ●當按摩椅墊本體或AC變流器發出異常聲響與異味、冒煙時，請立刻停止使用本產品，將AC變流器插頭從插座上拔下並洽詢DOCTORAIR客服專線。若繼續使用本產品可能會引發火災、造成觸電與意外事故。
 <p>禁止濕手</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●本產品並非防水產品，請勿在浴室等處使用，以免因漏電造成觸電與起火。
 <p>禁止在浴室淋浴間使用</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●請勿將水潑在本產品上，或是在浴室等潮濕的地方以及室外使用本產品以免造成觸電與產品故障。
 <p>禁止分解</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●切勿分解、改造本產品以免造成起火、意外事故與產品故障。

- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 取出電池前電器應切斷電源。
- 電器有發熱表面，熱感覺遲緩者，使用時須留意。

⚠ 注意

 <p>禁止</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●使用本產品時請勿將AC變流器插頭從插座或本產品上拔下，以免造成意外事故與受傷。 ●出現濕疹情況時請勿使用本產品。 ●使用時間請限制在1天15分鐘以內，此外請勿在同一部位連續使用3分鐘以上，長時間使用會造成反效果與受傷。 ●請勿將本產品用於按摩以外的用途，以避免受傷與身體不適。 ●請勿同時使用本產品與其他治療機器以免造成意外事故與身體不適。 ●請勿踩在、站在本產品上以避免受傷與造成產品故障。 ●請勿將本產品鋪在地上以躺下的狀態使用，或是將全身體重壓在按摩椅墊上使用。 ●請勿在使用本產品時睡覺，以免造成意外事故與受傷。 ●請勿讓本產品掉落、在產品上面放置重物、施加強烈衝擊，以免引發火災、造成觸電與意外事故。 ●使用本產品時請勿故意按壓按摩球等用力施加壓力，以避免受傷、造成身體不適與產品故障。 ●喝酒時或喝酒後請勿使用本產品以免造成意外事故與受傷。 ●使用本產品時請勿飲食。 ●使用本產品時請勿讓按摩球直接接觸肌膚。
 <p>務必遵守</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●使用擴充插座時，請務必遵守擴充插座的額定容量，以免引發火災與造成燒毀。 ●於飯前或飯後使用本產品時，請間隔足夠的時間再使用。
 <p>拔下電源插頭</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●停電時請立刻將AC變流器插頭從插座上拔下。 ●不再使用本產品時請將AC變流器插頭從插座上拔下，以避免濕氣、灰塵造成的絕緣不良所引發的火災與漏電。 ●開始打雷時請立刻將AC變流器插頭從插座上拔下。 ●清潔本產品時，請務必先將AC變流器插頭從插座上拔下再進行，以避免觸電或造成意外事故。

性能與安全性相關規格

1. 性能

項目	規格	備註
按摩次數： 具有按摩功能的機器	35次／分鐘（±10次）	測試方法： JIS T 2002：2006 6.3項
施療部分的移動速度： 具有施療部分移動功能 的機器	1.3cm／秒（±3%）	測試方法： JIS T 2002：2006 6.4項

2. 其他性能

項目	規格	備註
計時器	15分鐘（±10%）	測試方法： JIS T 2002：2006 6.5項

3. 加溫功能（無作為治療機器的溫熱效果）

項目	規格	備註
表面溫度（按摩球）	40°C以下（以環境溫度25°C換算）	測試方法： JIS C9335-2-32：2005 11.8項


使用目的與效果

於一般家庭使用，作為按摩、指壓替代用的機器。


※請勿用於其他用途。

各部位名稱與附件


本體

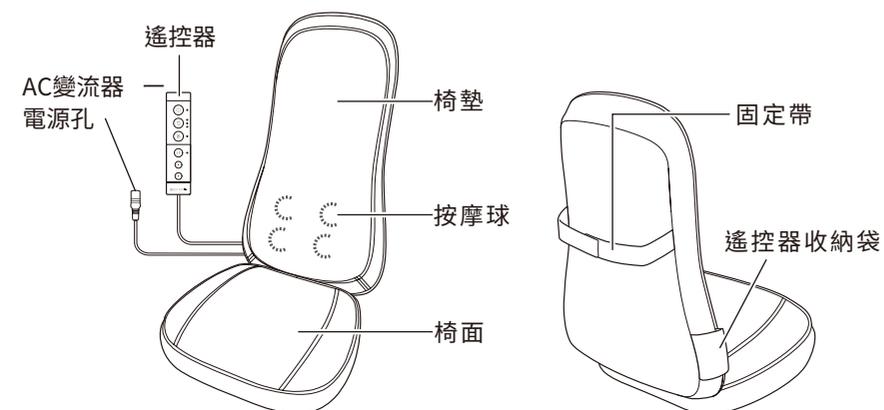


附件

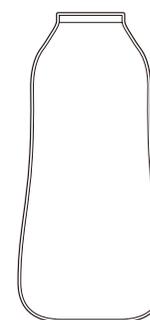

緩衝墊

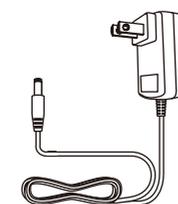


AC變流器

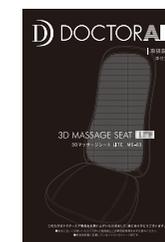

使用說明書（本書、附保固書）

遙控器功能說明

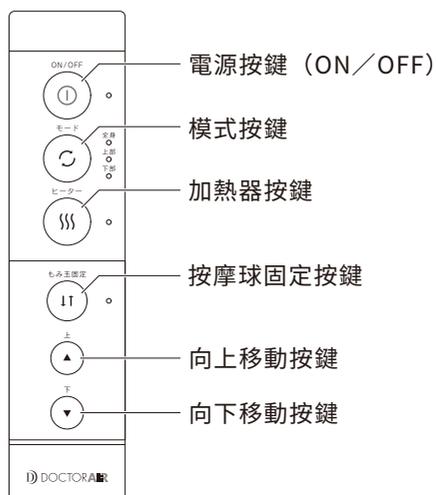

按鍵	說明
電源按鍵 (ON/OFF)	開啟/關閉電源，電源開啟時，電源按鍵 (ON/OFF) 右邊的指示燈會亮起。 若在產品動作中按壓按鍵，按摩球會慢慢往下移動，停止按摩並關閉電源。
模式按鍵	每次按壓都會從自動運轉模式按下列順序切換，您所選擇的模式會亮起指示燈。 全身→上部 (肩膀) →下部 (腰部) 
加熱器按鍵	開啟/關閉按摩球的加熱器，加熱器開啟時，加熱器按鍵右邊的指示燈會亮起。此外，一般按摩功能中發出藍光的按摩球會變紅。
按摩球固定按鍵	解除自動運轉，切換按摩球是否固定在目前位置，當按摩球的位置固定時，按摩球固定按鍵右邊的指示燈會亮起。
向上移動按鍵、 向下移動按鍵	長按後可以讓按摩球往上或往下移動。 僅只有在按摩球的位置固定時發揮功能。

使用方法

設置按摩椅墊

在有穩定靠背的椅子等設置按摩椅墊。


⚠ 注意

- 請勿在附輪子的椅子或旋轉椅上使用本產品，以免因傾倒造成意外事故與受傷。
- 若要在附後倒功能的椅子上使用本產品，使用中請特別小心，勿讓椅背向後倒。
- 若要在和室椅等使用本產品，請勿在電毯上使用。
- 若有刮傷椅子疑慮時，請在按摩椅墊本體與椅子之間夾防止刮傷用的墊子等。
- 將本產品設置在椅子上，或是移動按摩椅墊本體時，請將遙控器收進本體側面的遙控器收納袋、將AC變流器從按摩椅墊本體上拔下，以免拉扯到遙控器與AC變流器。
- 將AC變流器插入插座與按摩椅墊本體的電源孔時，請確實插到底。


- 1 將按摩椅墊本體放置在有靠背且穩定的椅子等上面，用固定帶將椅墊固定在椅背上。

注意

此時請務必確認本產品的椅墊套是否有破損部分，不論發現多麼小的破洞都切勿使用本產品。

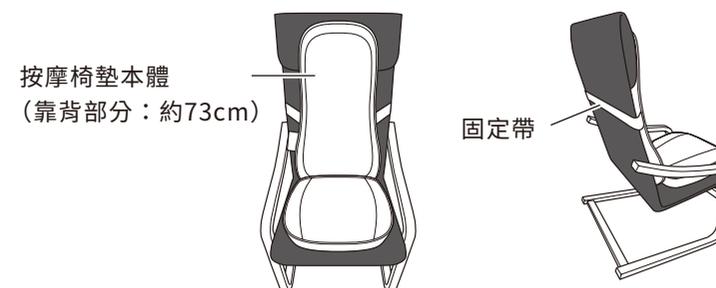

- 2 將AC變流器連接到本體的AC變流器電源孔，將AC變流器插頭確實插入家庭用插座。
若按摩球並未在椅墊最下方，連接AC變流器時將自動移動到最下方並停止。

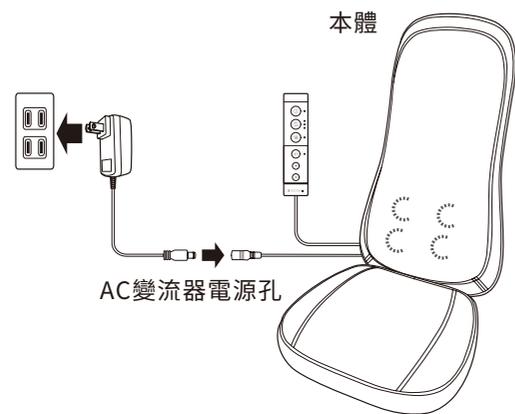


提示

若想減緩按摩的強度，可裝上本體的附件「緩衝墊」。
詳細說明請見下一頁的「安裝緩衝墊」。

安裝緩衝墊

若想減緩按摩的強度，請按下方說明裝上附件的緩衝墊。

- 1 將按摩椅墊本體安裝在椅子等後，將緩衝墊重疊放在本體的椅背部分。
- 2 使用緩衝墊上方附的魔鬼氈將緩衝墊固定在本體上。

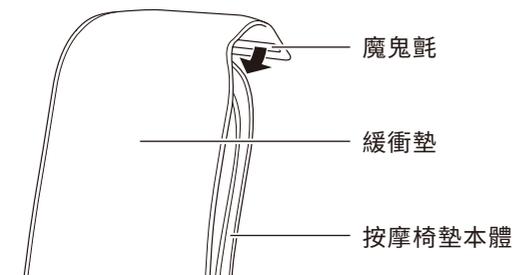


進行按摩

按照「設置按摩椅墊」（P11）的順序將按摩椅墊設置在有椅背的穩定椅子等，連接AC變流器之後，按下列方式進行按摩。

使用前

- 使用前請務必確認本產品的椅墊套是否有破損部分，不論發現多麼小的破洞都切勿使用本產品。
- 使用前請確認遙控器與計時器功能是否正常運轉。
- 若發現異常請停止使用，並洽詢DOCTORAIR客服專線。

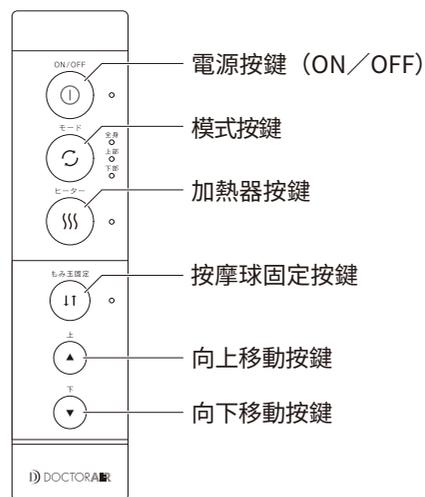

- 1 請小心下方的按摩球，坐滿設置有本產品的椅子。
- 2 按壓遙控器的電源按鈕（ON/OFF）。
電源按鈕（ON/OFF）右邊的指示燈將亮起，開始全身模式的自動運轉，模式按鈕右邊的全身指示燈也會亮起，按摩球會一邊按摩一邊緩慢往上移動。

- 3 請保持讓患部接觸按摩球的狀態。

注意

請勿使用在頭部與頸部。

- 4 視其必要性使用以下的遙控器按鈕，使用想要的模式或位置等進行按摩。

目的	使用按鈕
變更運轉模式，重點按摩背部的上方或下方	模式按鈕 每次按壓都會從自動運轉模式按下列順序切換，您所選擇的模式會亮起指示燈。 全身→上部（肩膀）→下部（腰部） ↑ └──┘
加熱按摩球	加熱器按鈕 加熱器按鈕右邊的指示燈會亮起，加熱器開啟後按摩球會變紅，在此狀態下再次按壓按鈕的話，加熱器會關閉，按摩球的顏色會變回藍色。
將按摩球固定在目前的位置	按摩球固定按鈕 按壓後右邊的指示燈會亮起，解除自動運轉，按摩球不再自動上下移動，在此狀態下再次按壓按鈕的話，按摩球的固定狀態會解除，回到自動運轉。
變更按摩球的位置（僅在按摩球的位置固定時可使用）	向上移動按鈕+向下移動按鈕 長按按鈕，待按摩球來到想要的位置後請放開按鈕。
結束按摩	電源按鈕（ON/OFF） 按摩球會慢慢往下移動，停止按摩並關閉電源。

按摩開始後約15分鐘，按摩會自動停止，關閉電源。遙控器的電源指示燈將熄滅。

若要中途停止按摩

按壓電源按鍵（ON/OFF）。


按摩球會慢慢往下移動，停止按摩並關閉電源。

遙控器的電源指示燈將熄滅。

使用後

待電源關閉後，請將AC變流器從插座與本體拔下，將遙控器收納在本體側面的遙控器收納袋。

請視其必要性擦拭髒汙，避開高溫潮濕的地方以室溫保管本產品。

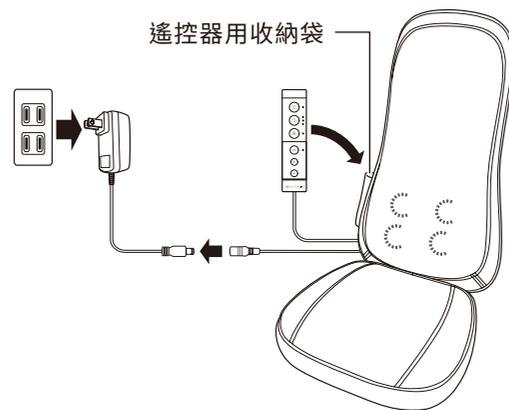

提示

若要將本體放入原廠紙箱裡保管，必須讓按摩球位於椅墊的最上方。

關閉電源、當按摩球移動到椅墊的最上方時請拔下AC變流器。

<

其他

清潔與保管說明

清潔說明

注意

- 請務必先將AC變流器插頭從插座上拔下再清潔產品。
- 請勿使用稀釋劑、揮發劑、酒精等溶劑或藥品類、熱水清潔本產品，以免造成產品故障、零件破裂或變色

請使用乾燥的軟布擦拭髒汙。

若髒汙情形嚴重，請使用沾水且徹底擰乾的海綿或軟布擦拭髒汙，之後再用乾布乾擦。

保管說明

- 保管時請務必將AC變流器插頭從插座上拔下。
- 若AC變流器的電源線有扭曲情況，請轉回原位再保管。
- 請仔細擦掉髒汙與灰塵，請勿將本產品保管在浴室等水氣與濕氣重的地方或是有直射日光的地方。
- 請將本產品保管在嬰幼兒、兒童與寵物無法接觸到的地方。
- 若要長時間放置保管，請擦拭髒汙與灰塵，套上防塵套再保管。

丟棄產品時

當您要丟棄本產品時，請按照您居住地之地方政府的丟棄分類處理。

AC變流器也請按照您居住地之地方政府的丟棄分類處理。

詳情請洽各地方政府。

疑似故障時

狀況	確認事項
按壓按鍵沒有反應	<ul style="list-style-type: none">· 請確認AC變流器是否確實連接到按摩椅墊的AC變流器電源孔與插座。· 請確認電源按鍵（ON/OFF）右邊的指示燈是否亮起。 若指示燈未亮起，請按壓電源按鍵（ON/OFF）開啟電源。
突然停止	<ul style="list-style-type: none">· 按摩開始後約15分鐘本產品會自動停止動作、關閉電源。· 若對按摩球施加壓力或內部溫度上升，本產品將因為安全裝置啟動而暫時停止運作，請放置1小時之後再試一次。
發出異常聲響	<ul style="list-style-type: none">· 本產品因構造關係，會產生某種程度的運作聲響，並非異常。

若上述方法未能解決問題，請洽詢DOCTORAIR客服專線。

安全裝置說明

本產品內部設有安全裝置，安全裝置主要會在下列情況啟動，自動關閉電源。

- 因連續使用等原因使得馬達或AC變流器的內部溫度高於規定溫度時
- 在按摩球上施加大量壓力時
- 偵測到任何安全上的異常時

馬達與AC變流器的內部溫度恢復到正常狀態後，可再次使用本產品。

若在使用產品中動作停止，按壓電源按鍵（ON/OFF）也未啟動時，請放置1小時之後再試一次。

主要規格

本體

銷售名稱	3D按摩椅墊LITE
型號	MS-03
使用目的及效果	於一般家庭使用，作為按摩、指壓替代用的機器
電源	AC110V 50 Hz /60 Hz
額定消耗功率	24 W（負重時 僅有加熱器時：4W）
消耗功率	10.5 W（無負重時）
按摩次數	35次／分鐘（±10次）
按摩球的移動速度	約1.3cm／秒（±3%）
計時器	15分鐘（±10%）
使用環境溫濕度	+10°C~+40°C 30~85%RH
保管環境溫濕度	0°C~+40°C 10~85%RH
尺寸	寬420mmX高1112mmX深155mm （不含按摩球部分）
質量	4kg（僅有本體）
附件	緩衝墊、AC變流器、使用說明書（附保證書）

原材料	ABS、聚酯纖維、聚胺酯
製造銷售	株式會社dream factory 商品管理中心 大阪市浪速區日本橋5-13-3北川大樓2F
產地	中國

AC變流器

型號名稱	SAW30-120-2000J
額定輸入	AC100-240V 50 Hz /60 Hz 0.8A
額定輸出	DC12V $\overline{\text{---}}$ 2000mA

※產品規格與設計可能會因為功能／機能提升而變更，將不另行通知。

維修用功能零件的持有期間

為維持製品的功能，必要維修用功能零件的最短持有期間為停產後起算5年。
當持有期限結束時，將不再提供維修服務。

若有其他疑慮時

若您要諮詢售後服務相關問題或是有任何疑慮，請洽詢您購買產品時的經銷商或是DOCTORAIR客服專線，

請進行愛心檢測

麻煩您檢測長年使用的3D按摩椅墊LITE					
 愛心檢測	<table border="1"> <tr> <th>產品是否出現這些症狀呢？</th> <th>請停止使用</th> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> ●冒煙、發出異常的味道或聲響 ●AC變流器出現異常高溫 ●動到AC變流器的電源線時，通電會斷斷續續的 ●異物或水跑到產品內部 ●本體或椅墊套、AC變流器有變形或破損 ●出現其他異常 </td> <td> 為防止產品故障及意外事故發生，請關閉電源，拔下AC變流器，向您購買產品時的經銷商或是DOCTORAIR客服專線洽詢檢測、修理相關事宜 </td> </tr> </table>	產品是否出現這些症狀呢？	請停止使用	<ul style="list-style-type: none"> ●冒煙、發出異常的味道或聲響 ●AC變流器出現異常高溫 ●動到AC變流器的電源線時，通電會斷斷續續的 ●異物或水跑到產品內部 ●本體或椅墊套、AC變流器有變形或破損 ●出現其他異常 	為防止產品故障及意外事故發生，請關閉電源，拔下AC變流器，向您購買產品時的經銷商或是DOCTORAIR客服專線洽詢檢測、修理相關事宜
產品是否出現這些症狀呢？	請停止使用				
<ul style="list-style-type: none"> ●冒煙、發出異常的味道或聲響 ●AC變流器出現異常高溫 ●動到AC變流器的電源線時，通電會斷斷續續的 ●異物或水跑到產品內部 ●本體或椅墊套、AC變流器有變形或破損 ●出現其他異常 	為防止產品故障及意外事故發生，請關閉電源，拔下AC變流器，向您購買產品時的經銷商或是DOCTORAIR客服專線洽詢檢測、修理相關事宜				

保固及售後服務

請連絡您購買產品時的經銷商諮詢使用方法、清潔、修理等事宜。

保證書

請確認「購買日期」、「經銷商名稱」欄位已填寫，並請詳讀內容後妥善保管。

委託修理時

請確認「疑似故障時 (P18)」的內容，若狀況沒有改善，或是相同的狀況不斷地發生時，請拔下AC變流器，將下列內容告知您購買產品時的經銷商。

- 購買日期
- 產品型號：MS-03
- 故障狀況（盡可能地具體描述）

若在保固期間內委託修理

本公司將按照保證書的規定修理產品。此外，在保固期間內亦有有償修理的情況，請您詳讀保證書。

保固期間：記錄在保證書上

保固期間結束後

若本公司判斷產品可以修理，將按照您的需求有償修理產品。修理費用由下列內容組成。

- 技術費用：判斷、修理、調整、檢測等費用
- 零件費用：修理時使用的零件及補助材料費用
- 待修品的運費：待修品的來往運費

限用物質含有情況標示

設備名稱：3D 按摩椅墊LITE，型號（型式）：MS-03 Equipment name Type designation (Type)						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
開關 電源	—	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
內部 配線	○	○	○	○	○	○
<p>備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>						

免費保固規定

- 本公司在您遵照使用說明書／貼在本體的標籤等的注意事項使用產品的狀態下，於產品在保固期間內故障時提供免費維修。
※若您要在保固期間委託免費維修，請將本產品與本書攜帶至經銷商並出示提出申請。
※您因搬家或將本產品作為禮物而無法在本保固書上填寫的經銷商獲得免費維修，請洽詢 客服專線。
- 縱使產品在保固期間，原則上以下情形將提供付費維修。
 - 因使用說明書以外的使用錯誤導致的故障及損壞
 - 不當修理及改造導致的故障及損壞
 - 購買後因產品的運送、掉落等造成的故障及損壞
 - 將產品使用於非一般家庭用（例如商用等）用途時發生的故障及損壞
 - 未出示保固書時
 - 保固書上未填寫購買日期、顧客姓名、地址、經銷商名稱，或是字句遭塗改時
 - 產品裝載於車輛、船舶等時發生的故障及損壞
 - 因火災、地震、水災、落雷、其他天災變異、異常電壓、非指定使用電源（電壓、頻率）等導致的故障及損壞。
 - 由本公司（及本公司關係企業）以外的人員所進行的錯誤修理以及改造導致的故障及損壞
 - 消耗品、本體以外的附件損耗
 - 因磨損及劣化造成的消耗零件更換
- 本保固書僅在臺灣地區效（This warranty is valid only in Taiwan.）。
- 本保固書不再發行，請妥善保管。付費維修時，待修品的運費、修理零件費用、技術費用、出差費用將由顧客支付。

維修 NOTE

- 本保固書保證本公司將依照本書上標示的期間、條件無償修理產品。因此，本保固書並非限制顧客法律權利之文件。若您對保固期間後的修理有疑慮，請洽詢經銷商或DOCTORAIR 客服專線。為維持產品的功能，必要零件的最短持有期限為停產後起算5年。當持有期限結束時，將不再提供維修服務。